

Jak správně odebrat vzorek stěrů sliznice u psů na analýzu DNA?

- ◆ Majiteli zvířete je zaslána sada na odběr, která obsahuje jednorázovou štětičku pro setření sliznice ústní dutiny, nůžky a eppendorfku (zkumavku) pro uchování vzorku (viz. Obrázek 1)
- ◆ Pes by neměl být alespoň hodinu před odběrem krměn.
- ◆ Vlastní odběr vzorku stěru sliznic, se provádí jednorázovou štětičkou nebo sondou, která se po odběru odstříhne do eppendorfky. Stěr se provádí opakovaným, otíráním vnitřní strany tváře a dásní a je vhodné jej provést alespoň ze tří míst v mordě psa. (Je vhodné i nechat psa lehce štětičku požvýkat).
- ◆ Zkumavku je nutno řádně zazátkovat. Pokud vzorek neposíláte okamžitě, uschovejte jej při teplotě 4-8 °C.
- ◆ Dejte pozor na kontaminaci - v každé zkumavce může být vzorek pouze jednoho zvířete!
- ◆ Nezapomeňte každý odebraný vzorek označit jménem, případně tetovacím číslem zvířete.
- ◆ Vzorky s vyplněným průvodním tiskopisem zašlete poštou na adresu Laboratoře imunogenetiky. Je vhodné použít např. bublinkovou obálku, aby nedošlo k poškození eppendorfky.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží při odběru vzorku se obraťte na Ing. D. Schröffelovou, tel.: 257 896 271, e-mail: dschroffel@cmsch.cz

Fotografie:



Obr. 1

Sada na odběr stěrů sliznice pro analýzu DNA u psů.